

[illegible]

RA test (facteurs rhumatoïdes) (Facteur rhumatoïde, RHF)	40790	micro	RHF6	CSSSRY	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228			
Rage	80528	micro	RAGE	LSPQ	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228			Indiquer l'adresse complète du patient.
Rapport A/G								Voir « Bilan protéinique ».
Rapport Kappa/Lambda								Voir « Chaînes légères (dans le sérum) Kappa/Lambda ».
Rapport (ratio) pO₂ (a) / FO₂ (I)								Compris dans le rapport pour gaz artériel.
Rapport protéines/créatinine	30404 30132	bio	AL/CR	CSSSRY	1 tube collecte urinaire	✓		Prélever une miction au hasard.
RAST								Voir « Immunoglobulines 1GE spécifiques (RAST ou allergie) ». Voir Jean Pinard pour coder allergènes.
RCoF (Cofacteur de la ristocétine)								Voir « Facteur Von Willebrand (Activité) (ELISA) ».

ANALYSE	#	Super- vision profession nelle	Code informatique	Effectuée À	Matériel de prélèvement et/ou de transport requis	JEUNE			REMARQUES
						4 HRES	8 HRES	12 HRES	
Section R-Z									

Réaction transfusionnelle (Analyses demandées lors d’une)	10513	B-Sang	POST I : GRRH CDIR* FSC URINE	CSSSRY	POST I: 1 tube blanc avec anneau noir - sec sans activateur GRE456085 1 tube lavande avec anneau noir - 6 ml - EDTA K2 GRE456002 1 tube lavande avec anneau noir - 4 ml - EDTA K2 GRE454440 1 tube collecte urinaire *** (HEM) Spécimen pré-transfusionnel				Toutes les réactions transfusionnelles doivent être déclarées Pour les réactions associées à un culot globulaire : POST I – II – III Pour les plasmas, cryoglobulines et plaquettes : POST I Produits stables : Voir référence 16.4 POST I : Lors de la réaction POST II : 7 heures après la réaction POST III : 7 jours après la réaction
			*Formulaire ** HEMOT (culture sac) *** HEMOA (hémoculture adulte) ou HEMOP (hémoculture enfant)						Formulaire : Un compte rendu de réaction transfusionnelle doit être acheminé avec le POST I ainsi qu’un formulaire AH-238 . Ensuite, vous devez remplir des formulaires AH-238 pour le POST II ainsi que le POST III. Bien préciser le POST concerné et toujours indiquer la date du POST I s’il s’agit d’un POST II ou d’un POST III. **HEMOT : La culture du sac est à la demande du service de biologie médicale (banque de sang). ***Hémoculture : Une demande d’hémoculture s’effectue selon certains critères de réaction transfusionnelle. Voir référence 16.4 concernant la réaction transfusionnelle.
			POST II : GRRH BILT *Formulaire		POST II: 1 tube lavande avec anneau noir - 6 ml - EDTA K2 GRE456002 1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				Identification des formulaires et spécimens (tubes) : Critères obligatoires selon les normes de la médecine transfusionnelle : Formulaire : - Nom et prénom du patient - # dossier et/ou RAMQ - Date et heure du prélèvement - Signature du préleveur (nom au complet) Tube : - Nom et prénom du patient - # dossier - Date et heure du prélèvement - Initiales de la personne qui prélève

ANALYSE	#	Super- vision profession nelle	Code informatique	Effectuée À	Matériel de prélèvement et/ou de transport requis	JEUNE			REMARQUES
						4 HRES	8 HRES	12 HRES	
Section R-Z									

			POST III: GRRH BILT *Formulaire	CSSSRY	POST III: 1 tube lavande avec anneau noir - 6 ml - EDTA K2 GRE456002 1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				N.B. : Un manquement à ces critères entraîne automatiquement le rejet du spécimen. Pour plus d'informations à propos des critères servant à identifier une réaction transfusionnelle, consultez la référence 16.4 concernant la réaction transfusionnelle.
Recherche chlamydia									Voir « Chlamydia (Recherche, incluant PCR) ».
Recherche d'anticorps (Anticorps, Anticorps irréguliers, Coombs indirect)	10086	B-Sang	Interne: AH-238 Externe: GRRH	CSSSRY	1 tube lavande avec anneau noir - 6 ml - EDTA K2 GRE456002				Pour groupe sanguin déjà connu des mères Rh négatif. Critères obligatoires selon les normes de la médecine transfusionnelle : Formulaire : - Nom et prénom du patient - # dossier et/ou RAMQ - Date et heure du prélèvement - Signature du préleveur (nom au complet) Tube : - Nom et prénom du patient - # dossier - Date et heure du prélèvement - Initiales de la personne qui prélève N.B. : Un manquement à ces critères entraîne automatiquement le rejet du spécimen .
Recherche d'anti-lupique									Voir « Anticoagulants lupiques ».
Recherche de cellules foetales									Voir « Hémoglobine foetale (Quantitatif) ».
Recherche de cellules de Sézary	20363	héмато	SEZAR	CSSSRY	*1 tube lavande avec anneau noir - 4 ml - EDTA K2 GRE454440	✓			* Fait à partir du tube pour la F.S.C. (formule sanguine complète)
Recherche de corps gras libre (urine)									Voir « Sédiment urinaire ».
Recherche de Clostridium difficile									Voir « Selles (Recherche de toxines Clostridium difficile) ».
Recherche de Cryptosporidium sp									Voir « Cryptosporidium (coloration) ».
Recherche de mycoses									Voir « Culture de mycoses ».
Recherche des sucres réducteurs									Voir « Sucres réducteurs (Qualitatif) ».

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

ANALYSE	#	Super- vision profession nelle	Code informatique	Effectuée À	Matériel de prélèvement et/ou de transport requis	JEUNE			REMARQUES
						4 HRES	8 HRES	12 HRES	
Section R-Z									

Réticulocytes	20470	hémato	1RETC	CSSSRY	1 tube lavande avec anneau noir - 4 ml - EDTA K2 GRE454440, I	✓			T°pièce. Un minimum de 2 ml est requis.
RHF									Voir « RA test (Facteurs rhumatoïdes) ».
Rickettsies (Anticorps) IgG ou Ac totaux (Autres que fièvre Q)	80529	micro	1 Ad verte	LSPQ	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				Il est important de préciser le genre et l'espèce des ricksettias recherchées. Indiquer l'adresse complète du patient
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses	80529	micro	1 Ad verte	LSPQ	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				Un deuxième spécimen est requis 21 jours plus tard. Indiquer l'adresse complète du patient. Un deuxième spécimen sérique est requis 15 jours plus tard. Pour le personnel du labo uniquement : Congeler.
Rivotril									Voir « Clonazépam (Sérum) ».
R.N.I.(rapport normalisé international)									Voir « Temps de Quick ».
R.N.P.									Voir « Anti-RNP ».
Ro									Voir « Anti-SSA (Ro) ».
Rotazyme		micro	1 Ad verte	J	1 contenant stérile 90 ml				Prélèvement de selles. Sur la requête, commander Rotazyme EIA.
Rotavirus	41370	micro	ELIS	J	1 contenant stérile 90 ml				Prélèvement de selles.
Rougeole (Anticorps) IgG ou Ac totaux	40791	micro	ROUGG	J	2 tubes dorés avec anneaux dorés - gel GRE454228				
Rougeole (Anticorps) IgM spécifique	40792	micro	ROUM	J	2 tubes dorés avec anneaux dorés - gel GRE454228				
Rouphylline									Voir « Théophylline ».
Routine S.E.P.									Voir « Electrophorèse des protéines (LCR)».
RPCA									Voir « Résistance protéine C activée ».
RSV antigène									Voir «RSV Virus respiratoire syncytial (Recherche) ».

[illegible][illegible]

[illegible]

RSV Virus respiratoire syncytial (Recherche) (RSV antigène, Virus respiratoire syncytial (recherche d'antigène))	41371	micro	RSV	CSSSRY	1 contenant stérile 90 ml				Aspiration nasopharyngée. Cette analyse est réservée à la population pédiatrique de 5 ans et moins. Les échantillons par écouvillon ne sont pas acceptés. Acheminer immédiatement au laboratoire après le prélèvement.
RT-PCR									Sigle signifiant Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction qui est une méthode de dosage. Pour une demande d'analyse par RT-PCR, commander le test précisant le virus recherché par RT-PCR : Exemple : Oreillons par RT-PCR HCV-RNA par RT-PCR
Rubéole (Anticorps) IgG ou Ac totaux) (Anticorps anti-rubéole (dépistage), anti-rubéole IgG)	40794	bio	RUBEG	St-Luc	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228	✓			
Rubéole (Anticorps) IgM spécifique	40797	micro	RUBM	J	2 tubes dorés avec anneaux dorés - gel GRE454228				Le prélèvement de deux sérums à 15 jours d'intervalle est utilisé pour confirmer le diagnostic de la maladie. L'analyse est également disponible sur un seul sérum dans les cas où l'on désire connaître le statut immunologique.

[illegible]

Saccharomonospora								Voir « Poumon du fermier IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Immunodiffusion double) ».
Saccharopolyspora								Voir « Poumon du fermier IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Immunodiffusion double) ».
Salicylates	30760	micro	SALI6	CSSSRY	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228			Indiquer sur le tube : - l'heure et la date du prélèvement.
Sang : -Hémoculture -Recherche de mycoses (ISOLATOR)								Voir « Culture, sang ».
Sang dans les selles (Qualitatif) (Gaïac, Guaïac)	30471	bio	GAIAc	CSSSRY	1 plaquette /recherche sang dans les selles	✓		Pour les patients ayant obtenu au préalable un ou plusieurs tests positifs, une diète spéciale doit être suivie. Voir régime 4.2
SARM								Voir «Culture, Staphylococcus résistant à la méthicilline (SARM) ».
Saturation de l'hémoglobine								Voir « Gaz sanguins (pO2, pCO2, pH, HCO3, COHb, métHb, oxyHb) »
Saturation du fer ou Saturation de la transferrine	30191 30511	bio	STRF6	CSSSRY	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228	✓		Calcul fait avec résultats des dosages du fer et de la transferrine.
Schistosomiase	80532	micro	SCHIS	LSPQ	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228			Indiquer l'adresse complète du patient. <i>Pour le personnel du labo uniquement: Congeler</i>

ANALYSE Section R-Z	#	Supervision professionnelle	Code informatique	Effectuée À	Matériel de prélèvement et/ou de transport requis	JEUNE			REMARQUES
						4 HRES	8 HRES	12 HRES	

ScL 70								Voir « Anti-ScL 70 (Topoisomérase) ».
« Scotch Tape » (Oxyures)								Voir « Oxyures »
Sécrétions auriculaires - Culture bactériologique - Recherche de mycoses - Recherche de BK								Voir « Culture, sécrétions auriculaires ».
Sécrétions conjonctivales ou oculaires -Culture bactériologique -Recherche de Neisseria gonorrhoeae -Recherche de Chlamydia trachomatis -Recherche de levures (Candida sp)								Voir « Culture, sécrétions conjonctivales ou oculaires ».
Sécrétions gastriques : -Culture bactériologique -Recherche de B.K.								Voir « Culture, sécrétions gastro-intestinales ».
Sécrétions gastro-intestinales : Sécrétions gastriques : -Culture bactériologique -Recherche de B.K.								Voir « Culture, sécrétions gastro-intestinales ».
Sécrétions oculaires								Voir « Culture, sécrétions conjonctivales ou oculaires ».
Sécrétions urogénitales : -Recherche de trichomonas, levures, « clue cells » -Recherche de Neisseria gonorrhoeae -Recherche de Chlamydia trachomatis -Recherche d’herpes simplex -Recherche de spirochètes -Recherche d’Ureaplasma urealyticum et de Mycoplasma sp								Voir « Culture, sécrétions urogénitales ».

[illegible][illegible]

[illegible]

Sex hormone binding globulin (SHBG)	30477	bio	HSHBG (homme)	HD	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228	✓		Demandé avec testostérone. <i>Pour le personnel du labo uniquement : Congeler.</i>
								Pour les femmes, le dosage de SHBG est remplacé par une demande de testostérone libre.
Sézary								Voir « Recherche de cellules de Sézary »
Signe du lacet	20253							Aviser le laboratoire. Fait par la technologiste.
Sinequan								Voir « Doxépine ».
Sirolimus		bio	1 Ad verte	ND	1 tube lavande avec anneau noir - 4 ml - EDTA K2 GRE454440	✓		Prélever le mardi seulement. Indiquer sur la requête : Pré ou Post dose. <i>Pour le personnel du labo uniquement : Conserver à 4°C. Envoyer le sang complet au CHUM Notre-Dame.:</i>
Slo-Bid								Voir « Théophylline ».
SLP (syndrome lympho-prolifératif)								Voir « Marqueur de surface cellulaire (Par marqueur)-Bilan SLP ».
SM								Voir « Anti-Sm ».
Snow								Voir « Cocaïne ».
Sodium (Na)	30478	bio	ISE6	CSSSRY	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228	✓		
Solubilité dans l'urée (facteur XIII)								Voir « Facteur XIII (dépistage) ».
Somatomédine C (IGF-1)								Voir « IGF-1 (Somatomédine C) ».
Somnol								Voir « Flurazépam ».
Somophyllin								Voir « Théophylline »
Sous-classes IGG								Voir «Immunoglobulines IgG (sous-classes) ».
Sous-unités alpha (Chaînes alpha)	30480	bio	1 Ad verte	HD	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228, GL	✓		Apporter immédiatement au labo. <i>Pour le personnel du labo uniquement :</i> Centrifuger à froid et congeler le sérum à -70°C dans un tube en polypropylène. Envoyer sur glace sèche.
Spermogramme (contrôle post-vasectomie ou vasovasostomie (recanalisation))	60633	patho	SPEGM	CSSSRY	1 contenant stérile 90 ml			Sur rendez-vous seulement le lundi sauf les jours fériés. S.V.P. contacter le centre de rendez-vous.

[illegible]

Spermogramme (test de fertilité)	60632	patho	SPEGM	CSSSRY	1 contenant stérile 90 ml				Sur rendez-vous seulement le jeudi sauf les jours fériés. S.V.P. contacter le centre de rendez-vous.
Spot urinaire		bio	SPOT	CSSSRY	1 tube collecte urinaire				Préciser l'analyse désirée : - Electrolytes - Osmolalité - Albumine/créatinine
Squames: -Recherche de mycoses superficielles (dermatophytes)									Voir « Culture de mycoses, mycoses superficielles, recherche de dermatophytes ».
SRAS									Voir « Coronavirus associé au SRAS (TAAN) ».
SSA									Voir « Anti-SSA (Ro) ».
SSB									Voir « Anti-SSB (La) ».
Stélazine									Voir « Phénothiazines (Qualitatif) (Médicament) ».
Stémétil									Voir « Phénothiazines (Qualitatif) (Médicament) ».
Stimulation au TRH (Courbe de TSH)	30516	bio	TRH6*	CSSSRY	4 tubes dorés avec anneaux dorés - gel GRE454228	✓			Réf. : Médecine nucléaire. 4 prélèvements à 0-15-30-60 minutes.
Streptocoque du groupe A (Anti-hyaluronidase)									Non disponible.
Streptocoque groupe A (Anticorps) (Quantitatif) (ASO) (Néphélométrie) (Antistreptolysine O (ASO))	40811	micro	ASO	CSSSRY	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				
Strongyloïdose	80535	micro	STRON	LSPQ	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				Indiquer l'adresse complète du patient. <i>Pour le personnel du labo uniquement: Congeler</i>
Substances réductrices									Voir « Sucres réducteurs (Qualitatif) ».
Sucres réducteurs (Qualitatif) (Clinitest, recherche des sucres réducteurs, substances réductrices)	30481	bio	SSRBT (selles) USRBT (urines)	CSSSRY	1 contenant non stérile 1 tube collecte urinaire				Urine ou selles.

[illegible]

Sueur (test à la) (Iontophorèse) (Stimulation, prélèvement) (Chlorures (test de sudation), Cl (test de sudation), Epreuve de sudation, Sudation (épreuve), Sueurs, Test de sudation, Test de sueur)	30482	bio							Cette analyse n'est plus disponible au CSSSRY. Communiquer avec l'Hôpital Charles-Lemoyne au (450) 466-5000 poste 2693 pour la prise de rendez-vous. Journée déterminée : Mercredi P.M.
Sulfonylurie									Voir « Hypoglycémiants »
Surmontil									Voir « Trimipramine ».
Syndrome respiratoire aigu sévère									Voir « Coronavirus associé au SRAS (TAAN) ».
Syphilis (VDRL) Antigène non tréponémique) (V.D.R.L.)	40814	micro	VDRL	CSSSRY	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

ANALYSE	#	Super- vision profession nelle	Code informatique	Effectuée À	Matériel de prélèvement et/ou de transport requis	JEUNE			REMARQUES
						4 HRES	8 HRES	12 HRES	
Section R-Z									

Tréponématose (FTA-ABS ou TPHA ou MHATP) (VDRL – confirmation sérum)		micro	CVDRL	LSPQ	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				Test habituellement disponible sur un sérum unique. Il n'est donc pas nécessaire de prélever un second sérum à 15 jours d'intervalle. Indiquer l'adresse complète du patient.
Triazolam (Halcion)	80102	bio	TRIAZ	SC-1	1 tube lavande avec anneau noir - 4 ml - EDTA K2 GRE454440	✓			Indiquer en commentaire de requête : - l'heure et date de la dernière dose - l'heure et la date du prélèvement <i>Pour le personnel du labo uniquement : Centrifuger et congeler le plasma.</i>
Trichinose ou Trichinellose	80624	micro	TRICH	LSPQ	2 tubes dorés avec anneaux dorés - gel GRE454228				Indiquer l'adresse complète du patient. Il peut s'avérer utile de répéter l'analyse 2 à 3 semaines plus tard. Indiquer s'il s'agit d'un sérum unique, d'un premier ou d'un second sérum. Il peut s'avérer nécessaire d'envoyer des échantillons sériés car les anticorps peuvent tarder. <i>Pour le personnel du labo uniquement : Congeler</i>
Tricycliques (dépistage)									Non disponible.
Trifluopérazine (Stélazine)									Voir « Phénothiazines (Qualitatif) (Médicament) ».
Triglycérides (Chylomicrons inclus)	30512	bio	TRIGL	CSSSRY	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228			✓	Eviter de consommer de l'alcool 48 heures avant le prélèvement.
Triiodothyronine totale (T3 total) (T3 RIA)	30500	bio	T3	CSSSRY	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228	✓			
Trimipramine (Surmontil)	80104	bio	TRIMI	SC-1	2 tubes dorés avec anneaux dorés - gel GRE454228	✓			Volume minimum de sérum : 3 ml Antidépresseurs tricycliques. Indiquer en commentaire de requête : - l'heure et la date du prélèvement - l'heure et la date de la dernière dose Pour toutes informations concernant le temps de prélèvement, contacter la pharmacie.
Triptil									Voir « Protryptiline ».
Troponine T	30513	bio	TRPT	CSSSRY	1 tube vert clair avec anneau jaune - héparine lithium avec gel GRE456087	✓			(Toujours écrire de nous faxer le résultat, écrire le # de fax de l'unité de soins).
Trou anionique		bio	TRANI	CSSSRY	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228,	✓			Calcul fait avec résultats des électrolytes (Na, Cl) et du gaz artériel ou veineux (HCO ₃).

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Uniphyl									Voir « Théophylline ».
Urates									Voir « Acide urique ».
Urée	30531	bio	BUN6	CSSSRY	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228	✓			
Uricémie									Voir « Acide urique ».
Uricosurie									Voir « Acide urique urinaire ».
Urine (examen sommaire) (Analyse d'urine)	30533	bio	URINE	CSSSRY	1 tube collecte urinaire				Urine du matin de préférence (environ 10 ml). Voir annexe 5.5 – 5.6.1 – 5.6.2
Urine (examen microscopique) (si spécifié)	30532	bio	MIC	CSSSRY	1 tube collecte urinaire				L'examen microscopique ne devra être demandé que si le médecin le spécifie; en d'autres cas, l'examen microscopique ne sera fait que si l'examen clinique indique la présence de leucocytes et/ou protéines et/ou hémoglobine. Voir annexe 5.5 – 5.6.1 – 5.6.2
Urines : -Recherche d'anaérobies -Recherche de levures -Recherche de B.K. -Culture virale									Voir « Culture, urines ».
Urobilinogène (Qualitatif)	30533	bio	URO	CSSSRY	1 contenant opaque 4L				Garder dans une bouteille opaque à l'abri de la lumière en tout temps. Conserver à 4°C. <i>Pour le personnel du labo uniquement : Faire bâtonnet pour urobilinogène, envoyer seulement si positif, à l'abri de la lumière.</i>
Uroporphyrines									Voir « Porphyrines «(Uro ou copro) (Quantitatif) ».

[illegible]

VHC (Charge virale, TAAN)									Voir « Charge virale Hépatite C ».
VHC (Génotypage par séquençage)									Voir « Génotypage Hépatite C ».
VIH (Anticorps) IgG ou Ac totaux (par labo de référence) (Anti-VIH, HIV, HTLV III (HIV))	40850	micro	VIH	St-Luc	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				<i>Pour le personnel du labo uniquement : Congeler.</i>
VIH Antigène p24 (antigène p24)	80630	micro	AGP24	LSPQ	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228 *remarques				Cette demande doit être accompagnée d'une demande de VIH. Indiquer l'adresse complète du patient. <i>Pour le personnel du labo uniquement : Congeler. Envoyer la demande d'Ag P24 en même temps que le VIH à l'Hôpital St-Luc. Selon les résultats, le spécimen sera acheminé au LSPQ par l'Hôpital St-Luc</i>
VIH génotypage pour résistance aux antirétroviraux / financement budget provincial laboratoire désigné (Génotypage du VIH)	41393	micro	GVIH	St-Luc	2 tubes lavandes avec anneaux noirs - 4 ml - EDTA K2 GRE454440				Analyse effectuée au centre de prélèvements de l'hôpital (HG-RC-240) avec rendez-vous (450) 771-3333 poste 3355. Lorsque combiné à un dosage de CD4-CD8 : doit être prélevé le mercredi A.M. Apporter le spécimen immédiatement au laboratoire. <i>Pour le personnel du labo uniquement : Expédier sur glace sèche 2 aliquotes minimum 1,5 ml chacun.</i>
Virus (microscopie électronique sur les selles)	80525	micro	1 Ad verte	LSPQ	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				Consulter microbiologiste. Indiquer l'adresse complète du patient.
Virus du Nil occidental (VNO)		micro	VNIL	LSPQ	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				Préciser le type de spécimen : 1 ^{er} sérum, 2 ^e sérum. - Le 1^{er} sérum sera envoyé sans attente. - Si un 2^e sérum est prélevé 15 jours plus tard, il sera envoyé également. Indiquer la médication antirétrovirale en cours.
Virus respiratoire syncytial (culture)									Voir « Culture virale ».
Virus respiratoire syncytial (Recherche d'antigène)									Voir « RSV Virus respiratoire syncytial (Recherche) ».
Viscosité plasmatique									Analyse non pertinente selon les critères de l'hématologiste.
Viscosité sanguine									Analyse non pertinente selon les critères de l'hématologiste.
Viscosité sérique									Analyse non pertinente selon les critères de l'hématologiste.
Vitamine A	30551	bio	VITA	J-1	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228, A	✓			A l'abri de la lumière.

[illegible]

Vitamine A et E (HPLC) incluant carotène β ».) (B-carotène, carotène bêta, carotène β (HPLC))	30110	bio	CAROT	J-1	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228, A	✓			A l'abri de la lumière.
Vitamine B1 (Thiamine)									Non disponible.
Vitamine B6									Non disponible
Vitamine B12	30553	bio	B126	CSSSRY	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228	✓			
Vitamine C (Ac ascorbique)									Non disponible.
Vitamine D (préciser 1-25 (OH) 2 ou 25 OH (activée) (voir Jean Pinard)	30555 30556	bio	VITD	J-1	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228	✓			Préciser le type de vitamine D demandé.
Vitamine E	30551	bio	VITE	SC-1	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228, A	✓			A l'abri de la lumière.
Vitesse de sédimentation (V.S.)									Voir « Sédimentation ».
VMA									Remplacé par « Catécholamines ».
VNO									Voir « Virus du Nil occidental ».

ANALYSE	#	Super- vision profession nelle	Code informatique	Effectuée À	Matériel de prélèvement et/ou de transport requis	JEUNE			REMARQUES
						4 HRES	8 HRES	12 HRES	
Section R-Z									

Widal (typhoïde + paratyphoïde)	90000	micro	1 Ad verte	LSPQ	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				Indiquer l'adresse complète du patient. Un deuxième spécimen sérique est requis 15 jours plus tard. <i>Pour le personnel du labo uniquement: Congeler</i>
Win-Rho	10701 10511	B-sang	AH-238	CSSSRY	*1 tube lavande avec anneau noir - 6 ml - EDTA K2 GRE456002	✓			*Un groupe sanguin et une recherche d'anticorps doivent obligatoirement avoir été faits dans les deux semaines précédentes.
X-ANCA									Voir « Anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles ».
X fragile (Diagnostic moléculaire porteur) (étude du X fragile, diagnostic moléculaire porteur)	50340	patho	XFRAG	J	1 tube lavande avec anneau noir - 4 ml - EDTA K2 GRE454440	✓			Renseignements cliniques obligatoires + brève histoire de cas. Peut être prélevé le mardi durant la journée ou le mercredi avant 8 h. Si prélevé le mardi : conserver à 4°C. Si prélevé le mercredi avant 8 h : Conserver à T° pièce. Faire parvenir immédiatement au service de biologie médicale. <i>Pour le personnel du labo uniquement: Envoyer le sang total dans le tube original. Conserver à 4°C.</i>
Xanax									Voir « Alprazolam (Sérum) ».
Xylose (épreuve d'absorption)	30581	bio	XYLO	St-Luc	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				Aviser le service de biologie médicale au moins une journée à l'avance pour la préparation de la solution de xylose. Apporter une requête au laboratoire en indiquant le poids et la taille du patient. Indiquer sur les requêtes : le poids, la taille et le volume de xylose à ingérer. Le patient doit être privé de liquide depuis au moins 8 h. Faire boire la solution de xylose au patient. Après l'ingestion de la solution, faire boire une quantité égale d'eau. Le prélèvement doit être fait exactement une heure après l'ingestion du Xylose.
Yersinia (sérologie)	80633	micro	1 Ad verte	LSPQ	1 tube doré avec anneau doré - gel GRE454228				Indiquer l'adresse complète du patient. Indiquer s'il s'agit d'un premier ou d'un second sérum. Un deuxième spécimen sérique est requis 15 jours plus tard. La demande d'analyse sera envoyée à notre laboratoire de référence uniquement sur réception du second sérum. <i>Pour le personnel du labo uniquement: Congeler</i>
Zarontin									Voir « Ethosuximide (Zarontin) ».
Zinc	30980	bio	ZINC	SC-1	1 tube lavande avec anneau noir		✓		Eviter l'hémolyse puisque les globules rouges contiennent 12 fois plus de zinc. DO (déclaration obligatoire).

[illegible]

				- 4 ml - EDTA K2 GRE454440				Centrifuger, décanner et envoyer le plasma congelé.
Zinc protoporphyrine (ZPP) (Sang)								Voir « Protoporphyrine liée au zinc ».